



Versión 0906202001

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS

NOMBRE DEL PRODUCTO:
TAPABOCAS DESECHABLE TERMOSELLADO 3 CAPAS

CARACTERÍSTICAS

	USOS	PRESENTACIÓN
Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre; sirven además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.	Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios, profesionales de belleza y público en general.	Caja x 50 unidades

COMPOSICIÓN

COMPONENTE	FUNCIÓN
CUERPO DEL TAPABOCAS	Compuesto de tres (3) capas de tela de polipropileno así: capa externa de 30 gramos, en el medio un filtro Meltblown de 27 gramos con eficiencia de filtración de 95% y la capa interna de 30 gramos.
ELÁSTICO DE SUJECIÓN A LA OREJA	Cada tapabocas cuenta con dos (2) elásticos de sujeción a las orejas con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del usuario.
SUJETADOR NASAL	Alambre plano recubierto, garantizando la comodidad y fijación del tapabocas; ajuste suave y confiable.

PARTES Y MATERIALES

ESTRUCTURA DEL TAPABOCAS

Es un textil no tejido termosellado

SUJETADOR NASAL

Alambre plano recubierto para la fijación del tapabocas

ELÁSTICO REDONDO

Poliéster elástico de 3 mm circular y/o plano

COLORES

Blanco y azul

DIMENSIÓN

17.5 cm X 9.8 cm



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca a fuentes de calor y olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO

- Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales y nasales.
- Comodidad para uso prolongado.
- Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar contactos con salpicaduras de fluidos y/o sangre
- Permite la respiración normal.
- Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso que no causa malestar al usuario.
- No es tóxico.

INSTRUCCIONES DE USO

- Lavado de manos antes de usarlo, lavado de manos después de quitárselo.
- Posicionar el tapabocas de manera que cubra desde el tabique hasta la barbilla.
- Los elásticos laterales deben aportar confort y comodidad garantizando su ajuste tanto al centro como a los lados.
- El sujetador nasal debe ser preciso, garantizando al máximo que no ingresen o salgan partículas.

APROBACIÓN

invim
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos