

PRODUCTO	Condon (de Latex natural)
TIPO	Condon Clásico Lubricado
MARCA	POSEIDON
REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019874
CATEGORIA	II b

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condon de látex natural, suave, transparente, simétrico.

MATERIALES: Latex Natural

ANCHO PROMEDIO: 52 + 2mm


LUBRICANTE: Silicona grado médico

LONGITUD MINIMA: ≥ 180 mm



COLOR: Transparente

VIDA UTIL: **5 años**

PRESENTACION: 100 unidades por caja

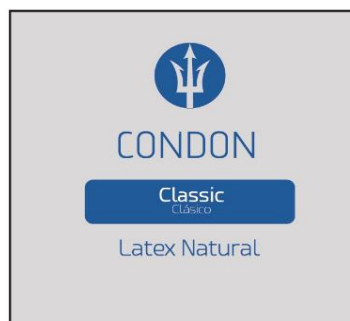

PRESENTACION: 108 Unidades por caja

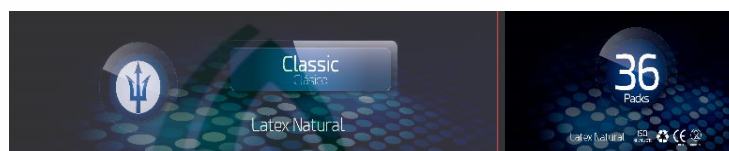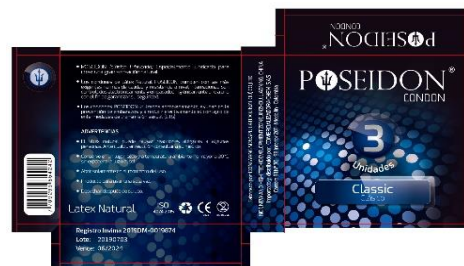

FINALIDAD PREVISTA

Los condones de goma de látex natural es un dispositivo anticonceptivo para hombres que adopta el método de barrera física para prevenir la infección por enfermedades venéreas y el SIDA. Antes de usar, El reborde debe estar por la parte exterior. Pon el condon sobre el pene erecto, sujeta la punta del condón para evitar que entre el aire y desenróllalo con cuidado hasta cubrir el pene. Tras la eyaculación, retíralo cuando el pene está aún erecto, para que no se pueda derramar el contenido.. El condón es un producto desechable. Coloque el condón usado en un contenedor o deséchelo adecuadamente.

INFORMACION IMPORTANTE

debe usarse dentro del período de validez. **Nunca lo use después de la fecha de caducidad (marcado "EXP" en la lámina y el estuche)**

Proteja los condones de la humedad, el calor, el daño físico y la luz solar directa. Guarde el condón en un lugar fresco y sombreado.

Saque cuidadosamente el condón del paquete. No use las tijeras. Evite que el condón se dañe con las joyas y las uñas.

El uso de lubricantes adicionales debe ser adecuado si es compatible. No use el lubricante que contiene radicales de petróleo, como vaselina, aceite de bebé, loción de baño, aceite de masaje, mantequilla y margarina porque dañarán la integridad de los condones.

Los condones no pueden tocar el radicales de petróleo, antisépticos, hidroxibenceno y su ramificaciones, lubricantes a base de petróleo, soluciones de petróleo, queroseno y las sustancias orgánicas relacionadas.

Las personas que son alérgicas al látex deben usar los condones con cuidado.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

En lo sucesivo, se confirma que cumple los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros relativas a la Directiva sobre dispositivos médicos (93/42 / CEE, modificada por 2007/47 / CE)

COMERCIALIZADORA CHEMI S.A.S.

CALLE 44 A No. 89 37 MEDELLIN - COLOMBIA

(604) 2961730

