



FICHA TECNICA
TAPABOCAS





1. DESCRIPCION GENERAL

Tapabocas con ajuste ergonómico en el tabique de la nariz que actúa como barrera de protección evitando la salida de fluidos bucales y el contacto con fluidos provenientes del exterior.

- ▶ No obstaculiza el campo visual para evitar accidentes.
- ▶ Es LAVABLE y REUTILIZABLE

2. APLICACIONES

Apto para uso personal, industrial y médico. Tales propiedades permiten su uso en todo tipo de piel, al igual que en adultos como en niños.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

- A. Tejido Tela No tejida: Color externo Blanco – Color interno sujeto a disponibilidad en el mercado.
- B. No. de capas 2: capa externa 100 gr – capa interna 70 gr.
- C. Resorte 3MM de Poliéster y Licra para ajuste en las orejas.
- D. Broches Metálicos para sujeción de los resortes.
- E. Platina Metálica 4MM para ajuste en el tabique.
- F. Espuma de poliuretano con dilatación interna para ajuste ergonómico y preciso en el tabique.
- G. Acabado termosellado en nariz y mentón.
- H. Biodegradable





4. PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA

- ▶ **DIFICULTAD PARA RESPIRAR:** Dejar de usar en caso se presentar dificultad para respirar.
- ▶ **IRRITACION:** Dejar de usar en caso de presentar irritación en la piel y acudir a un médico.

5. PRECAUCIONES DE MANEJO SEGURO Y USO

- ▶ **PRECAUCIONES PERSONALES:** antes de usar el tapabocas se deben lavar las manos con jabón antibacterial y enjuagar con agua. Luego de usar el tapabocas realizar el mismo procedimiento.
- ▶ **MODO DE USO:**
 - a) Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo.
 - b) El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la parte inferior del mentón.
 - c) Coloque las tiras de resorte detrás de las orejas.
 - d) Con ambas manos ajuste el soporte metálico ubicado en la parte superior del cuerpo del tapabocas. Moldee el soporte alrededor de la nariz con los dedos hasta quedar ajustado ergonómicamente.
 - e) El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible
- ▶ **USO:** Producto de uso doméstico, medico e industrial. Apto para todo tipo de personas



IMPORTANTE: El uso del Tapabocas no reemplaza el lavado de manos con jabón antibacterial y enjuague con agua.

6. PRESENTACIONES:

Contamos con varias presentaciones:

- ▶ Adultos tala M – L (Disponibilidad inmediata)
- ▶ Adultos talla S – XL (Disponibilidad bajo pedido)
- ▶ Niños (Disponibilidad bajo pedido)
- ▶ Posibilidad de personalización para empresas (logos, colores de tejidos, días de la semana). Sujeto a evaluación y cantidades mínimas.

7. ALMACENAMIENTO

- No requiere precauciones especiales. No es peligroso su almacenamiento y transporte.
- No almacenar cerca de fuentes de olor y calor.
- Almacene fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco, seco y con ventilación.
- Evite la exposición a chispas, llamas y calor excesivo.

