

# Ficha técnica KN95

**MEDICAL**  
**MASK**  
Tapabocas

## Especificaciones

<b>Nombre del producto:</b>	<b>Mascarilla respiratoria KN95</b>
<b>Protección:</b>	<b>Alta capacidad de filtración 95% DE FILTRACION</b>
<b>Tipo de aerosol:</b>	<b>Sin aceite</b>
<b>Color:</b>	<b>Blanco</b>
<b>Tamaño:</b>	<b>Universal</b>
<b>Válvula de exhalación:</b>	<b>NO</b>
<b>Accesorio de correa:</b>	<b>Grapado</b>
<b>Clips de nariz ajustables:</b>	<b>Sí</b>
<b>Estándares:</b>	<b>KN95</b>
<b>Certificación:</b>	<b>INVIMA No Aprobación 29422</b>
<b>Composición:</b>	<b>5 capas</b>



## Descripción del producto

<b>Presentaciones comerciales</b>	Unidad Empaque individual Caja x 500 unidades
<b>Especificaciones</b>	La máscara de respiración KN95 esta echa de 5 capas de tela no tejida de las cuales se compone de 50g, 50g, 40g, 40g y 30g cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 95% de partículas no oleosas. telas no tejidas que no son irritantes ni alergénicas.
<b>uso</b>	Este diseño se adapta a cualquier tamaño o forma de cara, tiene un clip nasal para ajuste de acuerdo con el tamaño deseado, su elástico es de alta elasticidad suficientemente suave y ajustable para sostener el tapabocas con un buen sellado.
<b>Frecuencia de uso</b>	Su uso es de 8 horas, pero según las pautas y políticas estatales nacionales y de control de infecciones en las instalaciones donde se encuentre el respirador puede ser utilizado hasta percibir daño y /o la respiración se vuelva difícil, su cambio es inmediato en cuanto se contamine con sangre o fluidos corporales.
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Se debe almacenar en un lugar libre de humedad y gases cáusticos debe ser un lugar con buena ventilación y seco.
<b>Disposición final</b>	Debe prohibirse su uso en caso de encontrarse un color diferente o con moho afectados por la humedad y deben ser destruidos cortado después de utilizados.



1. Pon la máscara cubriendo nariz y boca.
2. Estira el cordón pasándolo detrás de la oreja para sujetarlo.
3. Presiona la nariz para ajustar el clip a el tamaño de ella.
4. Cubra la máscara con sus manos exhale, luego inhale, ajuste la máscara hasta que no tenga fuga de aire.