

Nexfill é um curativo estéril acondicionado em caixa com 12 unidades ou envelopes com 01 unidade.

Tamanhos das películas lisas:

8 x 10cm, 10 x 16cm, 16 x 21 cm.

Tamanho das películas Porosas:

8 x 10cm, 10 x 16cm, 16 x 21 cm

com poros de 1.0mm, 1.5mm e 2.5mm.



Registro ANVISA
80531090001

Nexfill é esterilizado
por radiação gama.


43 3372-5200

www.nexfill.com.br

Resp. Técnico: Silvia E. Cestari Candoti, CRBM 1ª Região 27765

Seven Indústria de Produtos Biotecnológicos Ltda.
Rua Luiz Carlos Zani, 2783 - Jardim Santa Paula
CEP: 86.200-000 - Ibiçara - Paraná
fernando.nexfill@gmail.com

NEXFILL
CURATIVO DE BIOCELULOSE

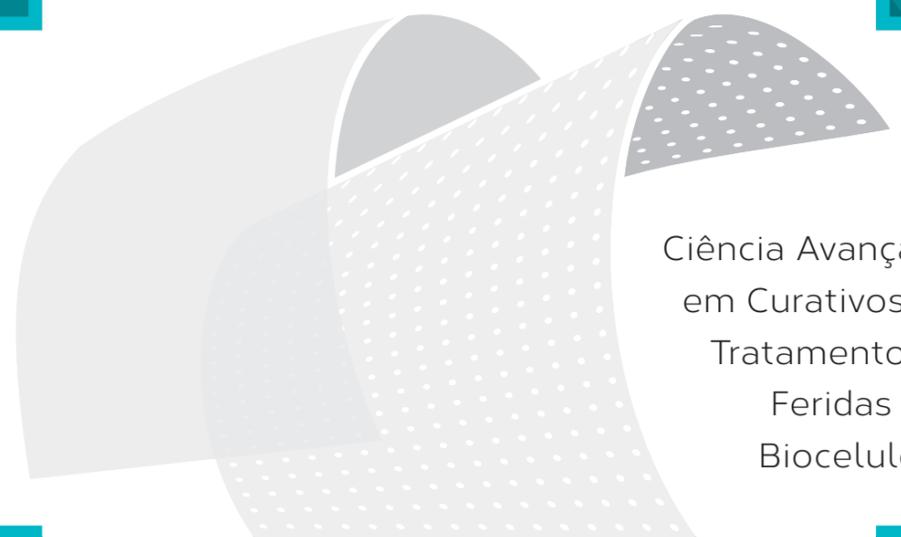

Ciência Avançada
em Curativos no
Tratamento de
Feridas por
Biocelulose

O Nexfill é um curativo estéril para recobrimento temporário de lesões cutâneas possuindo permeabilidade seletiva e protegendo a ferida. Os espaços interfibrilares da película oferecem pontos de ancoragem para as estruturas de fibrina e outros elementos do sangue. Isso faz com que a película tenha perfeita aderência sobre a parte cruenta da lesão. Assim, o Nexfill integra-se naturalmente ao organismo como um componente temporário, o qual irá desprender-se com a evolução da reepitelização, proporcionando o ambiente ideal para uma cicatrização completa.

Alívio da dor

A aderência perfeita da película à área lesionada isola as terminações nervosas, inibindo o estímulo doloroso.

Favorece a cicatrização

Nexfill mantém as condições normais de temperatura, umidade e oxigenação, conservando o microambiente natural da pele. Isso facilita a formação do tecido de granulação, garantindo uma reepitelização de excelente qualidade.

A redução substancial do número de curativos acelera o processo de cicatrização diminuindo os traumas dolorosos e os riscos de infecção.

Material 100% natural, feito à base de biocelulose

Nexfill não tem adesivos que podem provocar reações alérgicas.

Indicações

- Tratamento de feridas úmidas com perda de pele, com ou sem sangramento;
- Áreas doadoras de enxerto cutâneo;
- Tratamento de queimaduras de 2º grau;
- Tratamento de úlceras crônicas que venham apresentando escassa tendência à cicatrização com o uso de curativos convencionais;
- Tratamentos de úlceras e demais ferimentos em pacientes diabéticos.

No tratamento de lesões com perda de pele, superficiais ou profundas e com exsudação abundante é indicado o uso do Nexfill Poroso.

OBS: Ambos os curativos não são indicados para queimaduras de primeiro grau, pois o produto não irá aderir a pele e não surtirá os efeitos desejados.

Precauções

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou a película demonstre evidência de contaminação ou estrago;
- Não utilizar o produto se a data de validade estiver expirada;
- Não reutilizar o produto;
- O produto não deverá ser aplicado em casos de feridas com infecção.

Instruções Gerais de Uso e Aplicação




1 Lave cuidadosamente o ferimento para perfeita limpeza da área lesada. Só então retire o Nexfill da embalagem.



2 Coloque o Nexfill sobre a lesão. O curativo deverá cobrir todo o ferimento, com aproximadamente 1 cm além de sua borda. Se necessário, use duas ou mais películas de Nexfill, sobrepondo-as em mais ou menos 1cm.



3 Nexfill não contém adesivos. Para obter perfeita aderência à lesão, remova eventuais bolhas de ar através de suave compressão com gaze umedecida. É importante que a área lesada permaneça imóvel por 15 a 20 minutos.

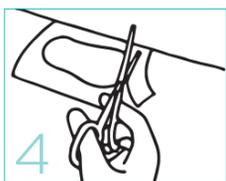

4 Após completa aderência do Nexfill (15 a 20 minutos), recorte as bordas da película. Para uso do Nexfill Liso não há necessidade do uso de curativo secundário, porém o mesmo pode ser utilizado para garantir a permanência do Nexfill em uma região de atrito ou para conforto do paciente que deseja não visualizar a lesão.



5 Para o uso do Nexfill Poroso coloque uma gaze esterilizada seca sobre o curativo. Fixe a gaze utilizando faixas, ataduras compressivas, esparadrapo, micropore ou outros similares.

- Em caso de feridas com muito sangramento ou exsudação usar o Nexfill Poroso.
- Em casos de infecção no local da ferida retirar imediatamente o curativo e tratá-la.
- Reaplicar o produto somente após a infecção curada.

Estudos de Casos

